

BARRERA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIOS POR COVID-19

NORMA:
UNE 0065:2020

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 y a la gran demanda de sistemas y productos barrera, se ha considerado necesario elaborar un documento con los requisitos mínimos que deberían tener las mascarillas higiénicas a ser utilizadas en este escenario, con el fin de que éstas complementen los gestos de barrera y las reglas sociales relacionadas con el distanciamiento entre personas.

ADVERTENCIA: Las mascarillas higiénicas objeto de esta especificación no deben considerarse un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

ESPECIFICACIÓN

La mascarilla higiénica está destinada a adultos y niños a partir de 3 años sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento técnico "Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19" publicado por el Ministerio de Sanidad.

DESCRIPCIÓN

Las mascarillas higiénicas:

- cubren nariz, boca y barbilla;
- están confeccionadas con un material reutilizable filtrante adecuado, que permite la respiración y que en contacto con la piel del usuario no presentan riesgos conocidos de irritación o efectos adversos para la salud.
- garantizan un ajuste adecuado con la cara.
- previstas para ser utilizadas en varias ocasiones siempre que se sigan las instrucciones de limpieza.

TALLAS

Las mascarillas higiénicas reutilizables se han desarrollado para cuatro tallas, una para adultos y niños mayores de 12 años y tres tallas diferentes para niños, de 3 a 12 años.



LAVADOS Y MANTENIMIENTO

10 ciclos de lavado a mano, a 60 °C (UNE-EN ISO 6330 programa 6N) y secado al aire (UNE-EN ISO 6330:2012, tipo A).

Se debe lavar a mano, diluyendo 30 ml de lejía en 970 ml de agua, caliente a 60°C, sumergir la mascarilla dejándola en esta solución durante unos 20 minutos, y dejar secar al aire, colgada en un lugar limpio.

Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 horas posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla. Almacenar en lugar limpio y seco y a una temperatura entre -20°C y +30°C con una humedad relativa máxima del 80%. Nunca modifique o repare la mascarilla.




USO

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

Antes del primer uso la mascarilla debe ser desinfectada siguiendo las indicaciones de lavado anteriormente descritas. Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos o frotelas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla

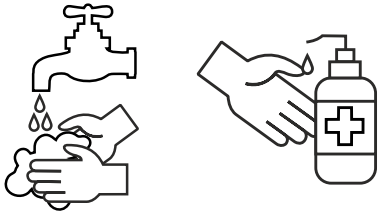

2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, ubicando la pinza nasal a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.



9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Los contenidos (datos, información, ilustraciones, logotipos, fotografías) que aparecen en este documento son propiedad exclusiva de Diseños Medi y cualquier copia, reproducción, alteración, difusión, adaptación, modificación integral o parcial del contenido de este documento es ilícita. Este documento es privado entre Diseños Medi y la persona o empresa a la que se le confía, y esta no podrá difundirlo ni facilitárselo, íntegra o parcialmente, a ninguna persona, empresa o sociedad, sin el permiso expreso de Diseños Medi.

UNE-EN ISO 6330
programa 6N
UNE-EN ISO 6330:201 tipo A

10 ciclos de lavado a 60 °C
Secado al aire



DATOS COMERCIALES

Código F09100A02B.001.UO
Embalaje BOLSAS DE 10 UNIDADES

TEJIDO

- Tejido 100% Polipropileno blanco
- Doble capa (60 g/m² + 60 g/m²)
- Elásticos laterales
- Clip nasal para adaptar en la mejor posición

RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. quitarse los guantes de protección
2. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
4. si se va a reutilizar la mascarilla véase el apartado de LAVADO Y MANTENIMIENTO y capítulo DESECHADO y si se va a desechar definitivamente
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

DESECHADO

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.